



**V A H L K A M P**

**HANDLEIDING**

Draadloos stoelalarm

**Voor meer informatie:**



**V A H L K A M P**

**Voor Nederland:**

Wilhelminalaan 1, 5707 BS Helmond

Telefoon: 0492- 52 89 75 • Fax: 0492 - 55 36 97

E-mail: [info@vahlkamp.nl](mailto:info@vahlkamp.nl) • Website: [www.vahlkamp.nl](http://www.vahlkamp.nl)

**Voor België:**

Postbus 61, 3960 Bree • Telefoon: 011 - 632 770



## GARANTIE

Vahlkamp hanteert een garantietermijn van 12 maanden bij normaal gebruik van dit product. Gedurende deze termijn worden reparaties gratis uitgevoerd.

Gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, breuk, vallen, demontage, brand- en/of waterschade, verwaarlozing of ondeskundige reparatie vallen niet onder de garantie. Batterijen vallen niet onder de garantie. In het voorkomende geval dient de koper zich te wenden tot Vahlkamp die de reparatie zal verzorgen.

## STORINGSWIJZER.

**Opmerking 1:** Belangrijk is dat de Stoelalarmmat niet gevouwen wordt.

**Opmerking 2:** Het draadloos Stoelalarm is voorzien van een codenummer (bijvoorbeeld 36-567). De code achterop de zendunit moet corresponderen met de code achterop de ontvangstunit.

**Opmerking 3:** Indien de plug niet aangesloten is op de zendunit kan er geen alarmsignaal doorgegeven worden. Hetzelfde gebeurt als de AAN/UIT-schakelaar in de UIT-stand staat.

**Opmerking 4:** Wanneer de zendunit niet gebruikt wordt dient de schakelaar op de UIT-stand te staan in verband met onnodig batterijverbruik

Controleer bij niet functioneren eerst of de pluggen goed bevestigd zijn en de schakelaar op de AAN-stand staat.

Is alles correct aangesloten doorloop dan de volgende punten:

De LED licht niet op bij het inschakelen van de zendunit:  
de kleine batterij van de zendunit dient verwisseld te worden.

Er wordt geen alarmsignaal doorgegeven en de batterijen zijn in orde:

- Zorg dat de stoel leeg is
- Zet de zendunit van UIT naar AAN.

Licht de LED twee maal op (lang-kort) dan is de mat beschadigd en dient er contact opgenomen te worden met Vahlkamp.

## 1. Kennismaking

Zojuist is het Draadloos Stoelalarm van Vahlkamp in ontvangst genomen. Bijgaand geven wij een overzicht voor installatie en gebruik, maar eerst zetten wij een aantal voordelen op een rij.

### PLUSPUNTEN

Behalve het hoofddoel, het alarmeren via het (bestaande) oproepsysteem indien de stoel verlaten wordt, kent het Draadloos Stoelalarm de volgende pluspunten:

#### Instelmogelijkheid tijd.

De intervaltijd tussen het verlaten van de stoel en het doorgeven van het signaal aan het oproepsysteem is instelbaar. Deze intervaltijd kent een keuzemogelijkheid tussen direct, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 1 min, 5 min, 15 min.

#### Uitgebreide testmogelijkheden / batterijcontrole.

- De schakelaar wordt AAN gezet: de LED licht even rood op
- Er wordt contact met de mat gemaakt: de LED licht even rood op
- Het contact met de mat wordt verbroken: de LED gaat gedurende 5 seconden rood branden. U kunt dus controleren of de activiteit bij de mat wordt gedetecteerd door de zendunit.


#### Geen hinderlijke snoeren.

Het Stoelalarm is draadloos. De Stoel kan daarom 5 à 10 meter van het oproepsysteem verwijderd zijn. Ook lopen er geen hinderlijke snoeren over de vloer.

#### 1.1 Onderdelen

Het Draadloos Stoelalarm bestaat uit de volgende onderdelen (zie afbeelding 1):

- 1. Zendunit**, met aan/uit-schakelaar en tijdstelknop.
- 2. Ontvangstunit**, met 220-240 Volt adapter en kabel voor aansluiting op het oproepsysteem.
- 3. Stoelmat**, grijze mat -35x35 cm- voor in de stoel, met kabel en plug.

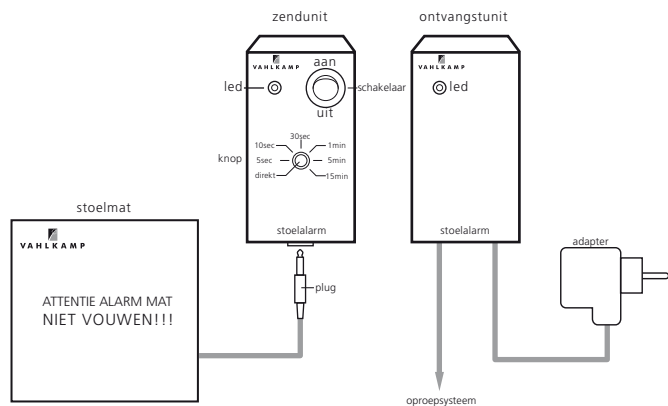

Afbeelding 1: Onderdelen draadloos Stoelalarm

## 2. Installatie

### 2.1 Ontvangstunit

Bevestig aan de grijze kabel een plug die geschikt is voor uw oproepsysteem, zoals de plug aan de peerbel of verlengde bel.

De aansluitingen van de grijze kabel zijn als volgt:

- bruin: NO
- groen: NC
- wit: COM

Voorbeeld:

Heeft uw oproepsysteem een maakcontact, sluit dan wit en bruin aan.  
Bij een verbreekcontact dient u wit en groen aan te sluiten.

Vervolgens dient de ontvangstunit op een vaste plaats aan de muur in de buurt van de oproepaansluiting bevestigd te worden.  
Steek de adapter in een 220-240 Volt wandcontactdoos en verbindt de plug met het oproepsysteem. De ontvangstunit kan nu het alarm doorgeven aan het oproepsysteem.

### 2.2 Zendunit

Plak de zendunit met behulp van de klittenband aan de achterkant van de stoel. Zorg dat de schakelaar op stand UIT staat.

### Stoelmat

De Stoelmat dient zodanig bij de patiënt / bewoner in de stoel gelegd te worden, dat de gebruiker er in het midden op zit. Verbindt vervolgens de jackplug van de mat met de zendunit. Werk de kabel weg zodat de mat geen belemmering vormt bij het opstaan en weglopen van de stoel.

De installatie is nu compleet. Het systeem kan zodra alles aangesloten is getest worden.

### 2.4 Testen

Het systeem dient op de volgende wijze in gebruik genomen te worden:

Stel de gewenste intervaltijd in. Houdt er rekening mee dat bij gebruik van de directstand het oproepsysteem direct wordt geactiveerd. Wordt deze stand gebruikt bij een patiënt / bewoner die veelvuldig beweegt c.q. verzit dan bestaat de mogelijkheid dat het oproepsysteem te vaak in werking treedt waardoor een zekere onoplettendheid kan ontstaan.

Zet de zendunit AAN. De LED licht even rood op.

Wanneer de patiënt/bewoner de stoel verlaat licht de LED even rood op. Na het verstrijken van de ingestelde tijd wordt het oproepsysteem geactiveerd en knippert de LED rood gedurende 5 seconden.

Het draadloos Stoelalarm is na het activeren van het oproepsysteem, direct weer gebruiksklaar. U hoeft niets te doen om de alarmfunctie opnieuw te activeren.

N.B. Wanneer de zendunit niet gebruikt wordt dient u de schakelaar in de UIT-stand te zetten in verband met onnodig batterijverbruik.