



**V A H L K A M P**

**HANDLEIDING**

Draadloos Tafelalarm

**Voor meer informatie:**



**V A H L K A M P**

**Voor Nederland:**

Wilhelminalaan 1, 5707 BS Helmond

Telefoon: 0492- 52 89 75 • Fax: 0492 - 55 36 97

E-mail: [info@vahlkamp.nl](mailto:info@vahlkamp.nl) • Website: [www.vahlkamp.nl](http://www.vahlkamp.nl)

**Voor België:**

Postbus 61, 3960 Bree • Telefoon: 011 - 632 770



# 1. Kennismaking


Zojuist is het Tafelalarm van Vahlkamp ontvangst genomen. Het Tafelalarm is speciaal ontwikkeld voor mensen met handfunctieproblemen. Er is slechts een lichte druk op de alarmunit nodig om het (bestaand) oproepsysteem te activeren.

## 1.1 Onderdelen

Het Tafelalarm bestaat uit de volgende onderdelen (zie afbeelding 1) :

**Alarmunit**, alarmplankje met geïntegreerde zender 185x185x18mm

**Ontvangstunit**, met 220 Volt adapter en kabelaansluiting voor het (bestaand) oproepsysteem

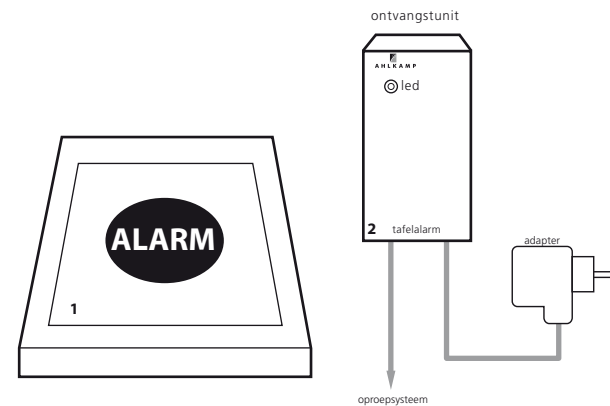

Afbeelding 1: onderdelen Tafelalarm

## 2. Installatie

### 2.1 Ontvangstunit

Bevestig aan de grijze kabel een plug die geschikt is voor uw (bestaand) oproepsysteem, zoals de plug aan de peerbel of verlengde bel.

De aansluitingen van de grijze kabel zijn als volgt:

- bruin: NO
- groen: NC
- wit: COM

#### **Voorbeeld:**

Heeft uw oproepsysteem een maakcontact, sluit dan wit en bruin aan. Bij een verbreekcontact dient u wit en groen aan te sluiten.

Steek de adapter in een 220 Volt wandcontactdoos en verbindt de plug met het (bestaand) oproepsysteem.

### Alarmunit

Leg de alarmunit op de plaats waar deze gebruikt gaat worden (tafel, bed, rolstoel enz.). De alarmunit is direct klaar voor gebruik.

De installatie is nu compleet. Het systeem kan getest worden door een lichte druk op het midden van het matje uit te oefenen.

### 2.3 Testen

Installeer de ontvangstunit zoals hierboven beschreven en druk op de Alarmunit. De led van de ontvangstunit zal rood gaan oplichten en gaan zoemen, om aan te geven dat de noodroep ontvangen is, vervolgens wordt het (bestaande) oproepsysteem in werking gezet. Na 12 seconden gaat de led weer groen branden en de zoemer stopt met zoemen om aan te geven dat de ontvanger paraat is om een nieuwe noodroep te ontvangen.

Als deze stappen doorlopen zijn is het Tafelalarm klaar voor gebruik.

## GARANTIE

Vahlkamp hanteert een garantietermijn van 12 maanden bij normaal gebruik van dit product. Gedurende deze termijn worden reparaties gratis uitgevoerd.

Gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, breuk, vallen, demontage, brand- en/of waterschade, verwaarlozing of ondeskundige reparatie vallen niet onder de garantie.

In het voorkomende geval dient de koper zich te wenden tot Vahlkamp die de reparatie zal verzorgen.