



**V A H L K A M P**

**HANDLEIDING**

Tafelalarm met mat

**Voor meer informatie:**



**V A H L K A M P**

**Voor Nederland:**

Wilhelminalaan 1, 5707 BS Helmond

Telefoon: 0492- 52 89 75 • Fax: 0492 - 55 36 97

E-mail: [info@vahlkamp.nl](mailto:info@vahlkamp.nl) • Website: [www.vahlkamp.nl](http://www.vahlkamp.nl)

**Voor België:**

Postbus 61, 3960 Bree • Telefoon: 011 - 632 770




# 1. Kennismaking

Zojuist is de Tafelalarmmat van Vahlkamp in ontvangst genomen. De Tafelalarmmat is speciaal ontwikkeld voor mensen met handfunctieproblemen. Er is slechts een lichte druk op de alarmmat nodig om het (bestaand) oproepsysteem te activeren.

## 1.1 Onderdelen

De Tafelalarmmat bestaat uit de volgende onderdelen (zie afbeelding 1) :  
**Zendunit**, die d.m.v. een kabel met plug verbonden is met het alarmmatje.  
**Ontvangstunit**, met 220 Volt adapter en kabelaansluiting voor het (bestaand) oproepsysteem  
**Alarmmat**, grijs alarmmatje van 170x170x4mm.

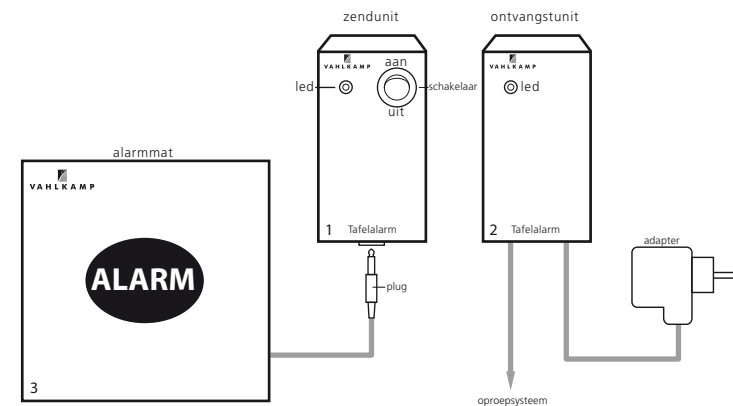

Afbeelding 1: onderdelen Tafelalarm met mat

## 2. Installatie

### 2.1 Ontvangstunit

Bevestig aan de grijze kabel een plug die geschikt is voor uw (bestaand) oproepsysteem, zoals de plug aan de peerbel of verlengde bel.

De aansluitingen van de grijze kabel zijn als volgt:

- bruin: NO
- groen: NC
- wit: COM

#### Voorbeeld:

Heeft uw oproepsysteem een maakcontact, sluit dan wit en bruin aan. Bij een verbreekcontact dient u wit en groen aan te sluiten.

Steek de adapter in een 220 Volt wandcontactdoos en verbindt de plug met het (bestaand) oproepsysteem.

### 2.2 Zendunit

Bevestig de zendunit aan de onder- of zijkant van de tafel

### 2.3 Alarmmat

Leg de alarmmat op tafel. Verbind vervolgens de plug van de mat met de zendunit.

De installatie is nu compleet. Het systeem kan getest worden door een lichte druk op het midden van de mat uit te oefenen.

### 2.4 Testen

Installeer de ontvangstunit zoals hierboven beschreven en druk op de mat.

De Led van de zendunit zal nu 5 seconden rood gaan branden om aan te geven dat de mat de noodroep uitzendt.

De led van de ontvangstunit zal rood gaan oplichten en gaan zoemen, om aan te geven dat de noodroep ontvangen is, vervolgens wordt het (bestaande) oproepsysteem in werking gezet. Na 12 seconden gaat de led weer groen branden en de zoemer stopt met zoemen om aan te geven dat de ontvanger paraat is om een nieuwe noodroep te ontvangen.

Als deze stappen doorlopen zijn is de Tafelalarmmat klaar voor gebruik.

## GARANTIE

Vahlkamp hanteert een garantietermijn van 12 maanden bij normaal gebruik van dit product. Gedurende deze termijn worden reparaties gratis uitgevoerd.

Gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, breuk, vallen, demontage, brand- en/of waterschade, verwaarlozing of ondeskundige reparatie vallen niet onder de garantie.

In het voorkomende geval dient de koper zich te wenden tot Vahlkamp die de reparatie zal verzorgen.