



V A H L K A M P

HANDLEIDING

Zuster Alarm Systeem (ZAS)

Voor meer informatie:



V A H L K A M P

Voor Nederland:

Wilhelminalaan 1, 5707 BS Helmond

Telefoon: 0492- 52 89 75 • Fax: 0492 - 55 36 97

E-mail: info@vahlkamp.nl • Website: www.vahlkamp.nl

Voor België:

Postbus 61, 3960 Bree • Telefoon: 011 - 632 770

1. Kennismaking


Het ZAS is een systeem dat wordt toegepast om een alarmering b.v. van een bedalarm, teleroep of onrustmelder te ontvangen op een pieper. Er wordt veel gebruik gemaakt van dit systeem in de zorgsector. Bijvoorbeeld op plaatsen waar geen (bestaand)oproep-systeem is zoals aanleunwoningen of gezinsvervangende tehuizen.

1.1 Onderdelen

De ZAS 1 bestaat uit de volgende onderdelen (zie afbeelding 1):

ZAS 1, De unit die het alarm ontvangt en doorgeeft aan de pieper.

Pieper, dit is een handzame ontvanger die het alarmsignaal ontvangt.

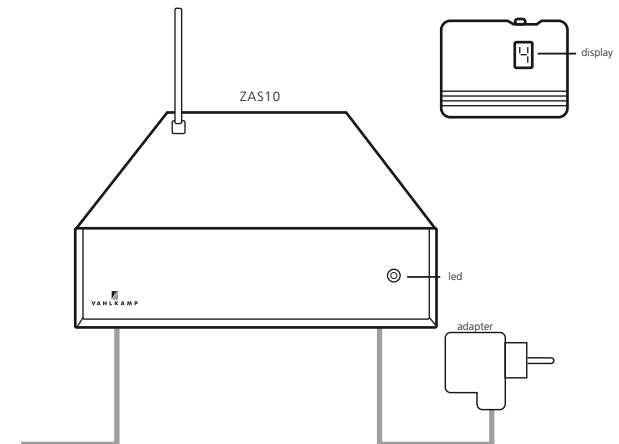

Afbeelding 1: onderdelen Zas 1

ZAS 1

Het ZAS ontvangt alarmmeldingen van bijvoorbeeld een bedalarm en bij ontvangst van een alarmmelding wordt de pieper geactiveerd. Het ZAS is standaard uitgevoerd met een 220 Volt adapter en een binnen-antenne.

Pieper(s)

Dit is een pieper die bijvoorbeeld het afdelingshoofd bij zich dient te dragen, zodat wanneer een alarmmelding wordt gegeven men deze ontvangt.

- voorzien van een clip om aan broek- of jaszak te bevestigen;
- voeding 3 Volt gelijkspanning, 2 stuks AAA batterijen eenvoudig te vervangen;
- "batterij leeg" indicatie;
- 60 sec. interval herinneringsoproep;
- afmeting, 84x54x20mm;
- gewicht ca. 85 gram;
- groot ontvangstbereik, richtingonafhankelijk, eventueel te vergroten met het plaatsen van een buitenantenne

2. Installatie

2.1 ZAS

Het ZAS wordt als volgt aangesloten:

U dient op de connector aan de onderzijde een 6,3 mm mono-jackplug aan te sluiten met een potentiaalvrij maakkontakt van bijvoorbeeld de teleroep.

Zet het ZAS op een vaste plaats in de buurt van de gewenste alarmering. Verbind/steek de mono-jackplug en steek de 230V AC in de wandcontactdoos.

Het ZAS kan nu het alarm doorgeven aan de pieper.

2.2 Pieper

Schuif het knopje op de bovenzijde van de pieper in de stand ON. De pieper piept kort om aan te geven dat hij paraat staat.

Als beide onderdelen zijn ingeschakeld als hierboven beschreven kan het systeem getest worden door een alarm te maken op de alarmingang.

GARANTIE

Vahlkamp hanteert een garantietermijn van 12 maanden bij normaal gebruik van dit product. Gedurende deze termijn worden reparaties gratis uitgevoerd.

Gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, breuk, vallen, demontage, brand- en/of waterschade, verwaarlozing of ondeskundige reparatie vallen niet onder de garantie.

In het voorkomende geval dient de koper zich te wenden tot Vahlkamp die de reparatie zal verzorgen.