



VAHLKAMP

HANDLEIDING
multisense

Voor meer informatie:



VAHLKAMP

VAHLKAMP International B.V.

A. Hofmanweg 5a - 2031 BH Haarlem - The Netherlands

T: +31 (0)23-7505163 - **E:** info@vahlkamp.nl - www.vahlkamp.nl

1. Kennismaking


1.1 Onderdelen

De Multisense "bedraad" bestaat uit 2 onderdelen:

- PIR Sensor
- Statief

De sensor wordt verticaal naast of boven het bed geplaatst zodanig dat de patiënt bij een geringe beweging het alarm niet af kan laten gaan (zeer gevoelig). De sensor wordt op een statief naast het bed geplaatst of anders met een houder aan de muur bevestigd. U kunt zelf proefondervindelijk bepalen wat de beste positie/plaats is, daar alle omstandigheden anders zijn.

Het alarm wordt aangezet met de schakelaar omlaag. Na het inschakelen zal het alarm zich ongeveer 60 seconden instellen, de groene Led knippert gedurende de insteltijd. Hierdoor is er voldoende tijd om, na installatie, de kamer te verlaten. Daarna is het alarm actief. Het groene led knippert nu met een intervaltijd van 5 seconden. Bij detectie zal de rode Led even oplichten.

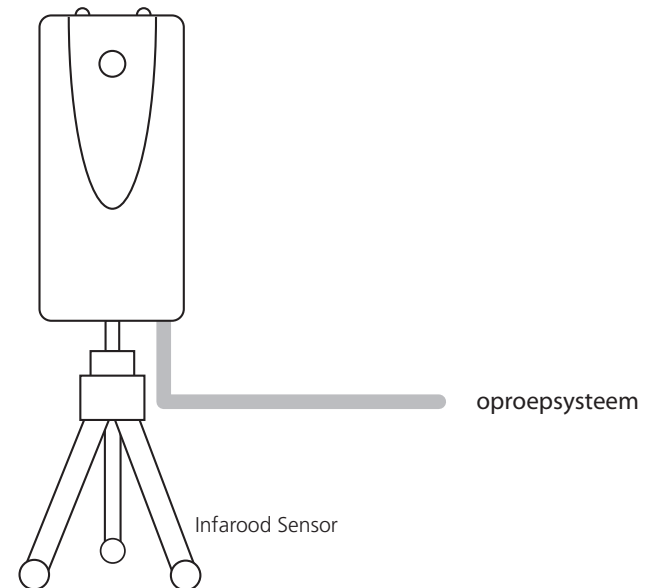

De Sensor is uitgerust met een niet oplaadbare batterij die ongeveer 2 à 3 jaar meegaat. Als de batterij bijna leeg is geeft de Multisense om de 5 minuten een piepsignaal en het rode Led zal gaan knipperen. Deze batterij is niet verkrijgbaar in de winkel, maar u kunt hem bij ons bestellen en zelf erin zetten. Ook kunt u de Multisense opsturen met de opdracht de batterij te vervangen. Het is wel van belang voor de levensduur van de batterij om de sensor uit te zetten als deze niet wordt gebruikt. De sensor wordt aangesloten op het oproepsysteem middels de grijze kabel die uit de ontvanger komt, hiervan is de codering:

- | | |
|---------|-------------------|
| - Bruin | Maakcontact |
| - Groen | Verbreekcontact |
| - Wit | Gemeenschappelijk |

Er moet een passende plug voor uw oproepsysteem aan de grijze kabel worden aangesloten.

De Multisense mag nooit geopend worden door ondeskundig personeel. Hierdoor zal de garantie vervallen. Indien er vragen zijn kunt u ons op onderstaand telefoonnummer bereiken.

GARANTIE

Vahlkamp hanteert een garantietermijn van 12 maanden bij normaal gebruik van dit product. Gedurende deze termijn worden reparaties gratis uitgevoerd.

Gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, breuk, vallen, demontage, brand- en/of waterschade, verwaarlozing of ondeskundige reparatie vallen niet onder de garantie. Batterijen vallen niet onder de garantie. In het voorkomende geval dient de koper zich te wenden tot Vahlkamp die de reparatie zal verzorgen.