

Voor meer informatie:



**VAHLKAMP International B.V.**

A. Hofmanweg 5a - 2031 BH Haarlem - The Netherlands

**T:** +31 (0)23-7505163 - **E:** [info@vahlkamp.nl](mailto:info@vahlkamp.nl) - [www.vahlkamp.nl](http://www.vahlkamp.nl)



**VAHLKAMP**

**HANDLEIDING**  
Teleroep



## STORINGSWIJZER

### Opmerking 1:

De halszender is spatwaterdicht. Het is raadzaam patiënten / bewoners te instrueren op de zender te letten wanneer zij bij de was- of afwasbak bezig zijn. Het kan gebeuren dat de zender in het water terecht komt wanneer zij voorover buigen.

### Opmerking 2:

Aangeraden wordt de zender op een vaste plaats te hangen of leggen wanneer de patiënt / bewoner naar bed gaat.

### Opmerking 3:

De Teleroep is voorzien van een codenummer (bijvoorbeeld 80-634). De code achterop de zendunit moet corresponderen met de code achterop de ontvangstunit

## 3. Uitbreiding Teleroep

Afhankelijk van de mobiliteit van de patiënt/bewoner zijn er verschillende soorten zenders verkrijgbaar:

**A Zender met extra grote drukknop:** voor patiënten / bewoners met handfunctieproblemen.

**B Blaas/zuigpijpje:** patiënten / bewoners die niet in staat zijn een van de andere alarmsystemen te bedienen kunnen door middel van blazen of zuigen het oproepsysteem in werking stellen.

**C Opbouwtrekschakelaar :** te plaatsen in bijv. de douche/toiletruimte.

## 1. Kennismaking

U heeft zojuist de Teleroep, het handige draadloze halsalarmzendertje van Vahlkamp ontvangen.


Bijgaand geven wij u een beknopt overzicht voor installatie en gebruik.

### 1.1 Onderdelen

De Teleroep bestaat uit de volgende onderdelen (zie afbeelding):

**Halszender**, een klein handzaam zendertje dat de gebruiker om de hals kan dragen

**Ontvangstunit** met 220-240 Volt adapter en kabel voor aansluiting op het (bestaande) oproepsysteem.

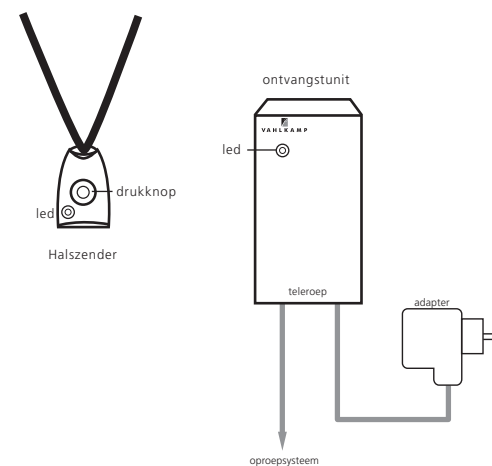

Afbeelding 1: Onderdelen Teleroep

## 2. Installatie

### 2.1 Ontvangstunit

Bevestig aan de grijze kabel een plug die geschikt is voor uw oproepsysteem, zoals de plug aan de peerbel of verlengde bel.

De aansluitingen van de grijze kabel zijn als volgt:

- bruin: NO
- groen: NC
- wit: COM

#### Voorbeeld:

Heeft uw oproepsysteem een maakcontact, sluit dan wit en bruin aan.  
Bij een verbreekcontact dient u wit en groen aan te sluiten.

Vervolgens dient de ontvangstunit op een vaste plaats aan de muur in de buurt van uw oproepaansluiting bevestigd te worden.  
Steek de adapter in een 220-240 Volt wandcontactdoos en verbind de plug met het oproepsysteem. De LED zal nu even rood oplichten en vervolgens groen worden zodat U kunt controleren of de Teleroep paraat is om noodoproepen te ontvangen.

### 2.2 Halszender

Door een druk op de knop van de spatwaterdichte halszender wordt deze gedurende 3-4 seconden geactiveerd en er wordt een noodroep doorgegeven aan de ontvangstunit.

De installatie is nu compleet. Het systeem kan getest worden.

### 2.3 Testen

Installeer de ontvangstunit zoals hierboven beschreven en druk op de knop van de halszender. De LED van de halszender brandt nu gedurende 3-4 seconden om aan te geven dat de halszender de noodroep uitzendt.

De LED van de ontvangstunit zal rood gaan oplichten en gaan zoemen, om aan te geven dat de noodroep ontvangen is. Vervolgens wordt het oproepsysteem in werking gezet. Na 10 seconden gaat de LED weer groen branden en de zoemer stopt met zoemen om aan te geven dat de ontvanger paraat is om een nieuwe noodroep te ontvangen.

Als deze stappen doorlopen zijn is de Teleroep klaar voor gebruik.

## GARANTIE

Vahlkamp hanteert een garantietermijn van 12 maanden bij normaal gebruik van dit product. Gedurende deze termijn worden reparaties gratis uitgevoerd.

Gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, breuk, vallen, demontage, brand- en/of waterschade, verwaarlozing of ondeskundige reparatie vallen niet onder de garantie. Batterijen vallen niet onder de garantie. In het voorkomende geval dient de koper zich te wenden tot Vahlkamp die de reparatie zal verzorgen.